

Het is klinisch bewezen dat **PREVALIN™ DIRECT KIDS** de symptomen van allergische rhinitis (acute ontsteking van het neusslijmvlies) vermindert, doordat het de allergenen tegenhoudt die een allergische reactie veroorzaken. **PREVALIN™ DIRECT KIDS** neusspray werkt daar waar de allergische reactie begint, in de neus op het neusslijmvlies. De gepatenteerde Nasya™ technologie van **PREVALIN™ DIRECT KIDS** bevat een combinatie van oliën en emulgatoren, die unieke transformerende eigenschappen bezitten. Zo verandert **PREVALIN™ DIRECT KIDS** van een gel in een vloeistof bij schudden voor makkelijke verstuiving. Bij contact van de vloeistof met het neusslijmvlies, wordt opnieuw een ondoordringbare micro-gel barrière voor allergenen gevormd. Omdat de meeste allergenen door de neus het lichaam binnenkomen, is **PREVALIN™ DIRECT KIDS** een ideale oplossing voor hooikoorts, allergische rhinitis, huisstofmijt en dierenallergie.

Prevalin™
DIRECT

Stopt allergenen na aanbrengen

KIDS



**WERKT SNEL
EN EFFECTIEF**

**BIJ HOOIKOORTS
HUISSTOFMIJT &
DIERENALLERGIE**

Wanneer PREVALIN™ DIRECT KIDS gebruiken?

Gebruik **PREVALIN™ DIRECT KIDS** zodra je merkt dat het lichaam reageert op allergenen, voordat de allergische reactie zich volledig ontwikkeld heeft.

Indien de allergische reactie al begonnen is, kan **PREVALIN™ DIRECT KIDS** gebruikt worden in combinatie met andere hooikoorts behandelingen. **PREVALIN™ DIRECT KIDS** voorkomt verdere blootstelling aan allergenen, die een allergische reactie kunnen veroorzaken, zodat een nieuwe of intensere allergische reactie wordt voorkomen.

Voor het beste resultaat wordt aangeraden **PREVALIN™ DIRECT KIDS** te gebruiken alvorens je in contact komt met allergenen, aangezien **PREVALIN™ DIRECT KIDS** voorkomt dat allergenen het neusslijmvlies bereiken en zo beperkt **PREVALIN™ DIRECT KIDS** de allergische symptomen.

Hoe werkt PREVALIN™ DIRECT KIDS?

PREVALIN™ DIRECT KIDS werkt daar waar allergenen een allergische reactie teweegbrengen, op het neusslijmvlies.



Thixotropic Formule

Gel verandert in vloeistof bij schudden.

PREVALIN™ DIRECT KIDS verandert bij schudden in een vloeistof voor makkelijke verstuiving. Bij contact van de vloeistof met het neusslijmvlies wordt opnieuw een ondoordringbare micro-gel barrière gevormd voor allergenen.

PREVALIN™ DIRECT KIDS microgel werkt als volgt:

1. De gepatenteerde formule schakelt de pollen uit.
2. Bevordert een snelle reiniging van de neus.
3. De fijne nevel vormt een ondoordringbare micro-gel barrière tegen verdere infectie van het neusslijmvlies door pollen.

Contra-indicaties

Dit product bevat sesamzaadolie. Gebruik dit product niet als u gevoelig bent voor sesamzaadolie of een van de andere ingrediënten in **PREVALIN™ DIRECT KIDS**. Zeer zeldzame gevallen van allergische reacties op **PREVALIN™ DIRECT KIDS** zijn gemeld. Het gaat hierbij om symptomen zoals verstopte en lopende neus, plaatselijke pijn, droogte, jeuk en zwelling van de neus, tranende ogen en huiduitslag. Bij een vermoeden van een allergie voor **PREVALIN™ DIRECT KIDS** dient u het gebruik onmiddellijk te staken en indien de symptomen aanhouden, uw arts (huisarts) te raadplegen.

Hoe PREVALIN™ DIRECT KIDS gebruiken?

Spray 1 à 2 keer in elk neusgat, 2 tot 3 keer per dag (werkt tot 6 uur). **PREVALIN™ DIRECT KIDS** is geschikt voor kinderen van 6 tot 12 jaar. **PREVALIN™ DIRECT KIDS** mag alleen gebruikt worden onder ouderlijk toezicht Het wordt aangeraden de neus goed te snuiten voor elk gebruik.



STAP 1

Voor het gebruik van **PREVALIN™ DIRECT KIDS**, het flesje minstens 4 keer goed schudden in rechte positie.



STAP 2

Draai het flesje ondersteboven en schud nogmaals minstens 4 keer.



STAP 3

Verwijder de blauwe dop van het flesje.



STAP 4

Klaarmaken voor het eerste gebruik: druk de witte applicator naar beneden gedurende 5-10 seconden en laat dan los. Herhaal dit tot er een volle spray uitgekomen is.



STAP 5

Buig het hoofd lichtjes vooruit. Houd het flesje recht, breng de verstuiver volledig in het neusgat en spray. Indien nodig nog een keer sprayen. Doe dit voor beide neusgaten.



STAP 6

Breng het hoofd terug rechtop en adem normaal door de neus.

Tijdens het eerste uur van gebruik, kan er een licht gevoel van verstopte neus ervaren worden. Dit is een voorbijgaand gevoel, dat snel zal weggaan en volledig zal verdwijnen bij verder gebruik. Als er ernstige ongemakkelijkheden optreden na gebruik van **PREVALIN™ DIRECT KIDS**, stop dan het gebruik of contacteer een arts. Indien gelijktijdig een andere neusspray gebruikt wordt, moet **PREVALIN™ DIRECT KIDS** opnieuw aangebracht worden zodat de ondoordringbare barrière niet verstoord wordt. Vermijd contact met open wonden.

Maximaal 30 dagen achtereenvolgens te gebruiken. Zodra de klachten terugkomen, kan de behandeling worden herhaald.

Hoe wordt PREVALIN™ DIRECT KIDS bewaard?

Bewaar op een koele, droge plaats. Bewaar niet boven 27°C. Niet bewaren in de koelkast of diepvriezer, omdat lagere temperaturen de druppelgrootte en spray formule aantasten. Na openen binnen 90 dagen gebruiken. Gebruik niet na de vervaldatum. Buiten het bereik van kinderen houden.

Ingrediënten:

Bentoniet veegum, xanthaangom, glycerolmonostearaat, kaliumfosfaat, dikaliumfosfaat, glycerine, sesamolie (sesam), water, gemengde tocoferolen, muntolie, conserveermiddelen (fenoxyethanol, caprylyl glycol, kaliumsorbitaat)

Goed om te weten

PREVALIN™ DIRECT KIDS is een medisch hulpmiddel. Het bevat geen geneesmiddelen (antihistamine, cortisone, ...).

De gepatenteerde formule bevat geen conserveermiddelen, alcohol of chemische geurstoffen. **PREVALIN™ DIRECT KIDS** veroorzaakt geen slaperigheid en is geschikt voor kinderen tussen 6 en 12 jaar, mits gebruikt onder toezicht van een volwassene. Het gebruik van **PREVALIN™ DIRECT KIDS** tast de werking van medicijnen, anti-histaminica tabletten of andere vormen van allergie-behandelingen niet aan.

■ Chefaro Ireland DAC,
The Sharp Building, Hogan Place, Dublin 2, Ierland

Distributeur:

Omega Pharma Nederland B.V., Postbus 6612, 3002 AP Rotterdam

Voor het laatst herzien september 2019

www.prevalin.nl

LF23833A 8100002122



20 ml e

280
doseringen

medisch
hulpmiddel

